

Příloha č. 1

## 1. Výběr vhodného transportního boxu



Sarstedt BD; ostatní

Sérum; plná krev  
(buňky, KO); ECP



Transportní box  
s teplotou  
15 - 25 °C

Zamražený vzorek séra



Transportní box  
s teplotou  
do - 5 °C  
VZORKY SE NESMÍ  
ROZMRAZIT!



Sarstedt BD; ostatní

Sérum; ECP



Transportní box  
s teplotou 5 - 25 °C

## 2. Kontrola teploty

Před vložením biologického materiálu do transportního boxu zkontrolovat teploměr. Vynulovat čidlo v boxu, je-li již v boxu BM, pak čidlo nenulovat.



Je-li teplota nižší pak otevřít víko od boxu a trochu vyvětrat.



Je-li v boxu teplota vyšší, přidat zásobní chladící vložku.

**3. Teplotu při transportu je potřeba dodržovat i při svozu BM v Brně!**